



Návod a doporučení pro provedení testu

Testovací sada obsahuje:




- Testovací kazeta pro jednorázové použití
- Zkumavka k extrakci vzorku pro jednorázové použití
- Stojánek na zkumavky
- Kapsle s extrakčním puřem
- Kapátko
- Papírový kelímek pro jednorázové použití

Před zahájením testování si připravte:

- Dezinfekční prostředek
- Nůžky/nožík pro otevření kapsle s extrakčním puřem

Provedení testu:

- Před zahájením testování se ujistěte, že všechny osoby, které jsou testování přítomny, používají vhodné ochranné pomůcky, **30 min před provedením testu se vyvarujte požívání jídla a tekutin, výplachu úst, či kouření.**
- Testovací soupravu nechte před použitím vytemperovat na pokojovou teplotu (15-30°C), dříve než začnete manipulovat se soupravou, pečlivě si vydezinfikujte ruce.
- Do odběrového **kelímku oberete vzorek slin a hlenu.**
- Doporučujeme dbát na **přítomnost hlenu** ve vzorku. Vzorek obsahující pouze sliny nemusí být dostačující pro získání relevantního výsledku testu.

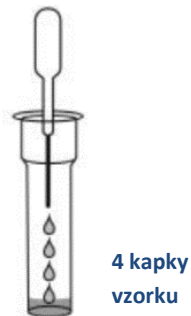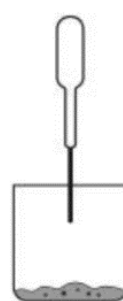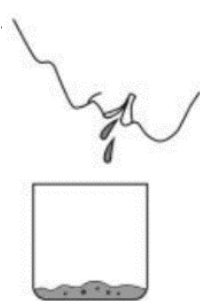


- Kapátkem naberte vzorek slin (po rysku na kapátku) a přeneste **4 kapky slin** do extrakční zkumavky.
- **Odstrihněte/odlomte** plastové vyústění **kapsle extrakčního puřu** a obsah přidejte ke vzorku slin v extrakční zkumavce. Extrakční zkumavku **uzavřete víčkem** a **protřepávejte 5 vteřin.**
- Z obalu **vyjměte testovací kazetu**, umístěte ji na vodorovnou plochu. Z extrakční zkumavky **ve svislé poloze nakapejte do otvoru na kazetě 3 kapky roztoku se vzorkem.**
- **Po 10 minutách odečtěte výsledek.**
- Po více než 20 minutách již výsledek neodečítejte.

Kapsle
s extrakčním
puřem



5 vteřin

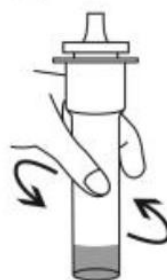

3 kapky
vzorku



Pozitivní



Negativní



Neplatný

- Po provedení testu zlikvidujte všechny komponenty soupravy, jako potenciálně biologicky nebezpečný odpad.